

# オブチビューの装着

Kerr™



片側の口角へ挿入します。挿入したフレームが外れない様に**フラップ**を押さえながら、反対側の口角へ挿入します。

両側の口角に装着されたフレームを**上下に閉じる**様にして口唇を被せます。

装着面観

- ・ピンクのクッションを外す際は、無理に捻らず真っ直ぐ引き抜いてください。
- ・フレーム、クッションともにオートクレーブ可能。134℃ 3分

一般医療機器 歯科用開口器 医療機器製造販売届出番号：13B1X10405100500

 **Envista エンビスタジャパン株式会社**

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラスタワー

TEL:0800-1111-8600 FAX:03-6866-7273

[www.envistaco.jp](http://www.envistaco.jp)

PM-100500\_Ver.1- 資 01 KR-0277