



# 本体がホワイトの遠心鋳造器のスプリングと バランスングピンについて

本体がホワイトの現行型遠心鋳造器は、従来品とパーツが一部異なります。

## ●異なるパーツ

1. スプリングコンプリート 2. 交換用バランスングピン

パーツをご注文される際は、下記品名の通り、ご注文をお願い致します。



ブルータイプに  
使用可能



ブルータイプに  
使用不可

品名：スプリングコンプリート ホワイト用 36,000 円

品名：バランスングピン ホワイト用 1,100 円

## ホワイトボディタイプの スプリング交換法

ホワイトボディタイプのスプリングを  
ブルータイプに組む場合も同様です。



クラッチボディー

1. ネジを外し、カバーを外します。  
クラッチボディーを引き上げて外します。



スプリング

2. スプリングを引き上げて外します。



3. クラッチボディーとスプリングを外した状態。



4. 交換用スプリングの溝を本体の凸部に合わせ  
せて装着します。



5. 止まるまで、しっかり押し込みます。



6. クラッチボディーの溝をスプリングのボ  
タンに合わせ、スライドしながら押し込  
み、装着します。



7. 交換完了。