

機械器具 58 整形用機械器具  
管理医療機器 歯列矯正用エラスティック器材 38733000  
**ズーパックエラスティック**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- 本製品には天然ゴムを使用しています。過去にアナフィラキシー症状様の経験がある医療関係者及び患者には使用しないこと。
- 再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

形状:



原材料: 天然ゴムラテックス

種類:

- 口腔内用

張力	内径 mm(1/4)	種類	製品コード	
			50袋	15袋
B	3.18 (1/8)	ハミングバード	630-0010	
	4.76 (3/16)	ウズラ	630-0011	
	6.35 (1/4)	フクロウ	630-0012	
	7.94 (5/16)	オウム	630-0013	
	9.53 (3/8)	ロートランナー	630-0014	
	12.7 (1/2)	クジラ	630-0015	
	15.9 (5/8)	ワシ	630-0016	
C	19.1 (3/4)	ダチョウ	630-0017	
	4.76 (3/16)	カワウソ	630-0020	
	6.35 (1/4)	アザラシ	630-0021	
D	7.94 (5/16)	イルカ	630-0022	
	9.53 (3/8)	カメ	630-0023	
	3.18 (1/8)	シマリス	630-0030	
	4.76 (3/16)	ウサギ	630-0031	
	6.35 (1/4)	キツネ	630-0032	
	7.94 (5/16)	ペンギン	630-0033	
	9.53 (3/8)	モンキー	630-0034	
E	12.7 (1/2)	ロバ	630-0035	
	15.9 (5/8)	ラマ	630-0036	
	19.1 (3/4)	キリン	630-0037	
	4.76 (3/16)	カンガルー	630-0040	
F	6.35 (1/4)	クマ	630-0041	
	7.94 (5/16)	シマウマ	630-0042	
	9.53 (3/8)	ラクダ	630-0043	
F	4.76 (3/16)	インパラ	630-0050	
	6.35 (1/4)	ヒツジ	630-0051	
	7.94 (5/16)	オシカ	630-0052	
	9.53 (3/8)	ハッパロー	630-0053	

B: ライト 2oz (60gm)      C: ミディアム 3oz (85gm)  
D: デイライト 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>oz (100gm)      E: ヘビー 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>oz (130gm)  
F: エクストラヘビー 6oz (170gm)

- 口腔外用

張力	内径 mm(1/4)	種類	製品コード	
			50袋	15袋
G	4.76 (3/16)	クーガー	634-0000	635-0058
	6.35 (1/4)	ヒョウ	634-0001	635-0059
	7.94 (5/16)	パンサー	634-0002	635-0060
	9.53 (3/8)	トラ	634-0003	635-0061
H	12.7 (1/2)	ライオン	634-0004	635-0062
	7.94 (5/16)	セイウチ	634-0012	635-0065
	9.53 (3/8)	ゾウ	-----	635-0066
	12.7 (1/2)	クジラ	634-0014	635-0067

G: ライト 8oz (230gm)      H: ヘビー 14oz (400gm)

**【使用目的又は効果】**

歯牙移動用の弾性ゴムリングとして用いる。

**【使用方法等】**

口腔内用は、要移動歯牙と固定歯牙のブラケットのフック間、又はフェイスボーンに掛けて使用する。口腔外用は、フェイスボーンとヘットギア間に使用する。食事中は取り外し、朝晩2回、患者自身が取り替える。

**【使用上の注意】**

【重要な基本的注意】

- 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

**\*【保存方法及び有効期間等】**

【貯蔵、保管方法】

高温多湿を避けて室温で保管すること。

【有効期間】

- 36ヶ月 [自己認証(製造元データ)による]  
使用期限は、包装に記載。

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者氏名: カボデンタルシステムズ株式会社  
連絡先: 03-6859-0065  
製造業者: オームコ社(Ormco Corporation)  
国名: アメリカ(U.S.A.)