

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント 41059000
リンガルアタッチメント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：

- ① アイレット
ボンド用(パッド付)
フラット [P/N:300-0091] カーブド [P/N:300-0090]




- ② クリート：犬歯、小白歯用
ウェルド用
[P/N:613-0012] [P/N:704-4024]



- ボンド用(パッド付) カーブド
[P/N:300-0092] [P/N:704-4014]




- クリート：大白歯用
ウェルド用 [P/N:613-0010]

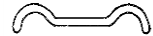

- ③ エラスティ ラグ
ウェルド用
フラット [P/N:614-0022] カーブド [P/N:614-0001]



- ボンド用(パッド付) カーブド
[P/N:300-0094]

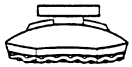

- ④ ボタン
ウェルド用
フラット [P/N:610-0001] カーブド [P/N:610-0002] モーラー [P/N:610-0003]
[P/N:704-4026]



- ボンド用(パッド付)
フラット [P/N:300-0097] カーブド [P/N:300-0096]
[P/N:704-4015] [P/N:704-4016]



- ⑤ ボールフック [P/N:613-0015]



原材料：ステンレス鋼

- ・ アイレット、クリート、エラスティラグ、ボールフック：
Cr 17.0～19.0%， Ni 8.0～10.0%，
その他 (C, Mn, P, S, Si) 5%以下, Fe 残余
- ・ ボタン:Cr 17.0～19.0%， Ni 8.0～10.0%，
その他 (C, Mn, P, S, Si, Se)5%以下, Fe 残余
- ・ パッド:Cr 16.0～18.0%， Ni 10.0～14.0%， Mo 2.0～3.0%，
その他 (C, Mn, P, S, Si, Cu)5%以下, Fe 残余

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

【使用方法等】

- ・ ウェルド用：バンドの舌側（リンガル）に溶接し、エラスチックあるいは結さつ材の装着に使用する。
- ・ ボンド用（パッド付）：適切な歯科用接着材を用いて歯面の舌側（リンガル）に接着し、エラスチックあるいは結さつ材の装着に使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 油脂等により、適切な接着力が得られなくなるので、ボンディングベースを直接手でさわらないこと。
2. 接着材が十分に硬化してからワイヤーを装着すること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 使用されるダイレクトボンド用接着材の種類、接着手順の不備等によっては装着中に脱落することがあるので、脱落した場合は、直ちに医師の診断を受けさせること。

【不具合・有害事象】

有害事象
掌跖膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【耐用期間】

製造から5年間[自己認証（製造元データ）による]

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先：03-6859-0065
製造業者：オームコ社 (Ormco Corporation)
国名：アメリカ (U.S.A.)