



埼玉県  
青島デンタルオフィス

青島 徹児  
先生

今回のアイテム

## オブチディスク／CR研磨ディスク ブルーホワイトカーバイドバー

### 3ステップで光沢のある良好な研磨面に オブチディスク／CR研磨ディスク

オブチディスクは、  
ディスクタイプの研磨  
器具で私の臨床で頻繁  
に使用している。  
本製品は3ステップ  
で簡単に光沢のある良  
好な研磨面が得られ

る。目の粗いものから、  
青、水色、白とカラーコ  
ード化され、ステップ  
が分かり易いシステム  
となっている。  
またポップオンで簡  
単にマンドレルに装着

ができ、装着部のオリ  
ングがシリコンで出来  
ている為、歯面に接触  
しても傷をつけない構  
造となっている。

コース(青)は、前歯  
切縁形態、辺縁偶角部  
などの形態修正に適し  
ている。ファイン(水  
色)、エクストラファイ  
ン(白)は、形態修正後  
の研磨、仕上げ研磨に  
適している。

特にディスク自体が  
93 $\mu$ m(エクストラ  
ファイン)と極薄の為、  
隣接面のコンタクト付  
近まで挿入して研磨が  
可能である。

### CRの形態修正に不可欠 ブルーホワイトカーバイドバー

私の臨床でブルーホ  
ワイトカーバイドバー  
は、ダイレクトボンディ  
ングの形態修正に不可  
欠である。

CR用の6本セットで  
あるエステティック・コ  
ンポジット・フィニッシ  
ング・キットの他にも形  
状のバリエーションが  
豊富で、臨床に合わせて  
自分のお気に入りの形  
状を使い分けることが  
出来る。1.2枚刃、1.8  
枚刃は形態修正と荒研  
磨に、3.0枚刃は若干の  
形態修正と中研磨に使  
用している。



②薄くコンタクト付近まで研磨可能



④リングはシリコン製で傷をつけない。



①充填前



③隅角部の形態修正



⑤完了



③形態修正2



②形態修正1



①充填前



歯頸部の形態修正



④形態修正完了