



東京都  
デンタルサロン麹町

山田 陽子  
先生

今回のアイテム

## オプチワンステップポリッシャー

# 1本で中研磨から艶だしまで行えるワンステップタイプのシリコンポイント

レジン充填の臨床的ポイントは、天然歯と如何に似た状況に仕上げ、良好な機能回復を行うことです。

そのためには、色調・形態のみならず、艶にも意識を集中させるべきでしょう。

艶のないレジン充填は、天然歯との調和が得られず、明らかに人工物による充填が行われていると認められてしまい、治療の成功とは言えません。

この重要なポイントの1つである艶に、効果的な結果を発揮するシリコン

ポイントが発売されました。

従来、様々な粗さの研磨ポイントやブラシを使い分ける必要がありました。このオプチワンステップポリッシャーは1本で中研磨から艶だしまで行えます。

力加減によって研磨力をコントロールすることが出来るため、始めは強めに当て（表面粗さ0・35μm以下まで）、その後、軽く当てる事により表面粗さ0・2μmまでの艶だし効果を期待できるというものです。まさしく、包

丁を研ぐような方法です。

このポイントにはフレイム、カップ、ディスクの3種類があり、使用部位に応じて、使い分けが可能となっています。

例えば、咬合面や平滑面にはフレイムを、咬頭や偶角の研磨にはカップを、そして、隣接面や切端には歯間鼓径空隙に合わせてディスクを使用します。

このシリコンポイントは、まさにオールインワンと呼べる優れたものであると思われれます。



歯頸部の研磨1



歯頸部の研磨2



大白歯の研磨



完了



前歯部充填研磨後の様子



ディスク使用による前歯部の研磨