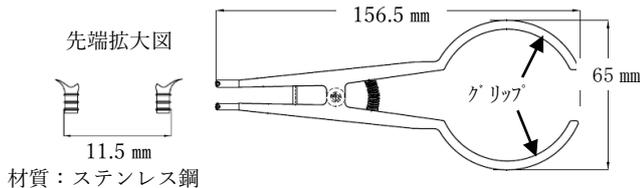


機械器具 65 歯科用充填器
 一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ鉗子 35851000
アプリケーション フォーセツプ

【禁忌・禁止】


ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある医療関係者、及び患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**【使用目的又は効果】**

ラバーダムクランプの適用及び除去に用いる。

【使用方法等】

- アダプトセクショナル マトリックス (別届出品) に使用する場合
 - 窩洞のサイズに合った、適切な形状のアダプトセクショナル マトリックスを選択し、隣接面に挿入する。
 - 歯頸部にアダプト ルーシーウェッジ(別届出品)を差し込み、アダプトセクショナル マトリックスを固定する。

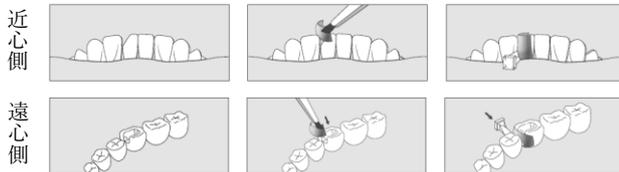

- アプリケーション フォーセツプの先端内側にアプロキシマルシェーバーを取り付ける。
- アプリケーション フォーセツプでアプロキシマルシェーバーを広げ、把持したままアダプトセクショナル マトリックスの下端で歯間部にアプロキシマルシェーバーを装着する。
- アプリケーション フォーセツプを取り外し、アダプトセクショナル マトリックスが正しい位置になるようにアプロキシマルシェーバーを調整する。



- ソフトクランプに使用する場合

- アプリケーション フォーセツプの先端を、ソフトクランプの穴に差し込む。
- ソフトクランプを保持した状態で口腔内に挿入し、ラバーダムが正しく装着された歯牙の歯頸部を、頬側と舌側からウィングで挟み、ラバーダムを押さえる。

**【使用上の注意】**

- 使用前に必ず洗浄・滅菌 (保守点検に係る事項参照) を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 洗浄、消毒、滅菌後の製品は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆、シミ等の原因となることがある。

[有効期間]

- 60ヶ月 [自己認証 (製造元データ) による] 使用期限は、包装に記載。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前・使用後の点検
 - 使用後は、汚物を除去し、感染防止のため洗浄・消毒又は滅菌すること。
- 洗浄・滅菌
 - 使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて速やかに洗浄すること。
 - 高圧蒸気滅菌(134°C、3分)を実施する。

[保守・点検に関する注意事項]

- 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
- 加熱滅菌器 (オートクレーブ滅菌器など) の乾燥温度には注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社
 連絡先 : 03-6866-7272
 製造業者 : カー・ハーヴェ社 (KerrHawe SA)
 国名 : スイス(Switzerland)