

歯科材料 (9) 歯科用研削材料  
 一般医療機器 歯科研削用ストリップ 35702000  
**ポリッシング ストリップス**


再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

研削粒子が片面にコーティングされた歯科用ストリップで、研削粒子の粒度は4種類あり、1枚のストリップの両端にそれぞれ異なる粒度の研削粒子がコーティングされている。粒度はカラーコードで識別できる。ストリップの幅と粒度の組合せにより4種類の製品から構成される。

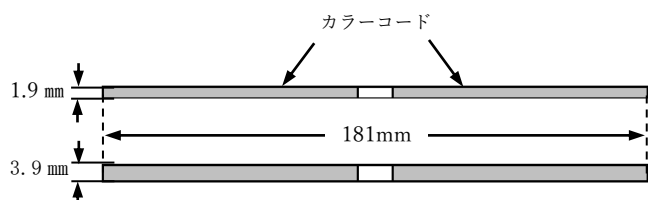

製品番号	幅	種類	色
290	1.9mm	コース/ミディアム	ホワイト/ブルー
291	1.9mm	ファイン/エクストラファイン	イエロー/ピンク
292	3.9mm	コース/ミディアム	ホワイト/ブルー
293	3.9mm	ファイン/エクストラファイン	イエロー/ピンク

原材料

ストリップ: ポリエチレンテレフタレート (PET)

研磨材: アルミナ

**【使用目的又は効果】**

研削粒子が片面にコーティングされた歯科用ストリップで、歯牙又は修復物の表面の修正に用いる。

**【使用方法等】**

ストリップを歯間に入れ、下記の研磨ステップに従って、隣接面のフィニッシング及びポリッシングを行う。



ストリップを歯間に入れ込む場合には、研磨粒子がコーティングされていない中間の透明な部分を使って、研磨面が接触しないように入れ込む。

研磨ステップ	種類 (色)
1 ↓	コース (ホワイト)
2 ↓	ミディアム (ブルー)
3 ↓	ファイン (イエロー)
4	エクストラファイン (ピンク)

**【保管方法及び有効期間等】**

[有効期間]

- ・60ヶ月 [自己認証 (製造元データ) による]
- 使用期限は、包装に記載。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社

連絡先 : 03-6866-7272

製造業者 : カー・ハーヴェ社 (KerrHawe SA)

国名 : スイス (Switzerland)