

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科研削用ストリップ 35702000

オプチストリップ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

ストリップ表面に研削粒子がコーティングされた歯科用ストリップで、粒度は2種類あり、色で識別できる。ストリップの幅と粒度の組合せにより複数の種類から構成される。

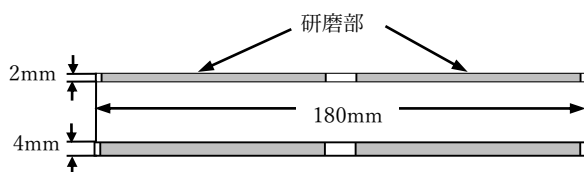

製品番号	幅	種類	色
1991	2mm	フィニッシング	ブルー
1992	2mm	ポリッシング	ホワイト
1993	4mm	フィニッシング	ブルー
1994	4mm	ポリッシング	ホワイト

原材料

ストリップ:ポリエチレンテレフタレート (PET)

研磨材: アルミナ

【使用目的又は効果】

研削粒子が片面にコーティングされた歯科用ストリップで、歯牙又は修復物の表面の修正に用いる。

【使用方法等】

下記の研磨ステップに従ってストリップを歯間に入れ、隣接面のフィニッシング及びポリッシングを行う。

ストリップを歯間に入れ込む場合には、研磨粒子がコーティングされていない中間の透明な部分を使って、研磨面が接触しないように入れ込む。



研磨ステップ	種類 (色)
1	フィニッシング (ブルー)
↓	
2	ポリッシング (ホワイト)

【保管方法及び有効期間等】

[有効期間]

・60ヶ月 [自己認証 (製造元データ) による]
使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先 : 03-6866-7272
製造業者 : カー・ハーヴェ社 (KerrHawe SA)
国名 : スイス (Switzerland)