

## ガッタ パーチャ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ラテックスによりアナフィラキシー症状様の経験がある医療関係者及び患者へは使用しないこと。
- 再使用禁止


#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 概要

本品は歯科で使用する X 線不透過性の橙色の根管充填ポイントで、メインポイントとアクセサリポイントから構成され、それぞれに数種類のサイズがある。


##### 2. 形状及び寸法

###### 1) メインポイント

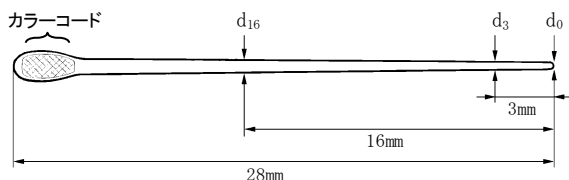

サイズ名	表示番号	d <sub>0</sub> 直径 (mm)	d <sub>3</sub> 直径 (mm)	d <sub>16</sub> 直径 (mm)	カラーコード	製品番号
No. 15	015	0.15	0.21	0.47	白	12648
No. 20	020	0.20	0.26	0.52	黄	12649
No. 25	025	0.25	0.31	0.57	赤	12650
No. 30	030	0.30	0.36	0.62	青	12651
No. 35	035	0.35	0.41	0.67	緑	12652
No. 40	040	0.40	0.46	0.72	黒	12653
No. 45	045	0.45	0.51	0.77	白	12654
No. 50	050	0.50	0.56	0.82	黄	12655
No. 55	055	0.55	0.61	0.87	赤	12656
No. 60	060	0.60	0.66	0.92	青	12657
No. 70	070	0.70	0.76	1.02	緑	12658
No. 80	080	0.80	0.86	1.12	黒	12659

###### 2) アクセサリポイント

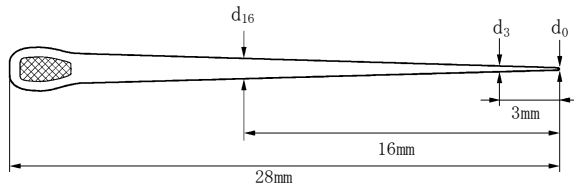

サイズ名	表示番号	d <sub>0</sub> 直径 (mm)	d <sub>3</sub> 直径 (mm)	d <sub>16</sub> 直径 (mm)	製品番号
ファイン・ファイン (FF)	01126	0.11	0.19	0.53	13985
ミディアム・ファイン (MF)	01232	0.12	0.22	0.63	13986
ファイン (F)	01344	0.13	0.25	0.83	12644
ファイン・ミディアム (FM)	01447	0.14	0.28	0.90	13987
ミディアム (M)	01558	0.15	0.32	1.08	12645

原材料: ガッタパーチャ、酸化亜鉛、硫酸バリウム、蜜蝋、色素、炭酸カルシウム、ジブチルヒドロキシトルエン

#### 【使用目的又は効果】

歯の根管の充填に用いる。

#### 【使用方法等】

- 使用するガッタ パーチャを 2.5%次亜塩素酸ナトリウム溶液により消毒する。
- メインポイントの先端部から 15~20mm までの部分に根管充填用シーラーを付着させる。
- 拡大、形成された根管にメインポイントを挿入し、上下動を行ないながら根端(尖)まで挿入する。
- スプレッターを用いてガッタ パーチャに側方圧を加え、根管空隙が充塞されるようにアクセサリポイントを順次追加して挿入する。
- 根管口から出ている余分なガッタ パーチャ上部を切除する。

#### 【使用方法に関連する使用上の注意】

本品を高圧蒸気滅菌や乾熱滅菌しないこと。

#### 【使用上の注意】

##### 【重要な基本的注意】

- ラテックスに対する感受性の高い患者では発疹、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下などのアレルギー症状やアナフィラキシーショックを起こす可能性がある。従って、本品を使用する前には必ず患者のラテックスに対する感受性を評価し、このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師の診断をうけさせること。

#### \* 【保管方法及び有効期間等】

##### 【保管方法】

- 高温多湿を避けて保管すること。

##### 【有効期間】

- 36ヶ月 [自己認証(製造元データ)による]  
使用期限は、包装に記載。

#### \*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社  
連絡先 : 03-6866-7480  
製造業者 : オームコ社 (Ormco Corporation)  
国名 : アメリカ (U.S.A.)