

歯科材料5 歯科用接着充填材料  
管理医療機器 歯科用エッチング材 36153000

## ゲルエッチャント

再使用禁止(ディスポーザブルチップ)

### 【禁忌・禁止】

- ・本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある患者には使用しないこと。
- ・ディスポーザブルチップは、1回の使用ごとに交換し、再使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

性状:ゲル  
容器:シリンジ  
組成:リン酸、二酸化けい素、精製水、色素、その他  
原理:含有するリン酸により、歯又は修復物の表面を酸処理する。

付属品:ディスポーザブルチップ

### 【使用目的又は効果】

歯又は歯科修復物のエッチング(技工専用を除く)に用いる。

### 【使用方法等】

1. シリンジに、付属のディスポーザブルチップを装着する。
2. エッチングする修復部位に約15秒間ゲルエッチャントを塗布する。
3. ゲルを完全に除去するため、水で15秒以上洗浄する。
4. 油分を含まない清潔なエアード乾燥させる。
5. 使用する接着材料の使用説明書に従い、修復作業を行う。
6. 使用後はディスポーザブルチップを取り外し、キャップをして保管する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) シリンジ・プランジャーを押した時に抵抗が感じられる場合は、新しいチップと交換すること。
- 2) エッチングした部位をエアード乾燥する時は、象牙質を乾燥させ過ぎないように注意すること。
- 3) 接着手順の際に、エッチング処理を施した修復部位が唾液または血液で汚染されないように注意すること。

### 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 本材は、リン酸を含んでいますので、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。皮膚に付着したり、目に入った場合は直ちに大量の流水で洗い流し、医師の診断を受けさせること。

### \*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]  
高温多湿を避けて保管すること。

[有効期間]  
・36ヶ月 [自己認証(製造元データ)による]  
使用期限は、包装に記載。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社  
連絡先 : 03-6866-7272  
製造業者 : カー社(Kerr Corporation)  
国名 : アメリカ(U.S.A.)