

# カー製品

キャンペーン期間: 2022年11月21日~2023年2月20日

# CR研磨製品キャンペーン

ご好評の CR研磨関連製品を期間限定の特別価格でご提供させていただきます。  
この機会にぜひ、お試しください。


※掲載価格は全て標準価格です。キャンペーン価格につきましては、お取り引き歯科ディーラー様にお問い合わせ願います。

## オプチディスク / CR用研磨ディスク


- オプチディスクは平滑面や隣接面のコンポジットレジンを研磨するのに適したシステムです。
- ディスクは表裏返してマンドレルに装着できます。
- 研磨粒子に合わせてカラーコード化されています。
- コンポジットレジンをはじめ、グラスアイオノマー、プレシャス及びセミプレシャスメタルを含む修復物の調整・研磨に使用出来ます。




一般医療機器 歯科用アブレイブディスク  
医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149100900

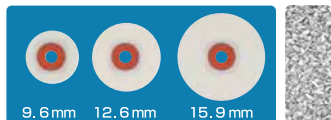

9.6mm 12.6mm 15.9mm  
ブラウン: コース/ミディアム 40μm(荒目)

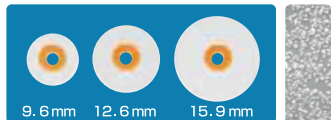

9.6mm 12.6mm 15.9mm  
オレンジ: ファイン 20μm(中目)

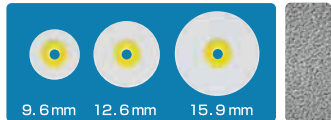

9.6mm 12.6mm 15.9mm  
イエロー: エクストラファイン 10μm(細目)



唇側の研磨



唇側、口蓋側及び舌側と部位に合わせて表裏返してマンドレルに装着できます。



部位に応じたサイズ選択が可能。  
使用回転数: 10,000回転/分以下



専用のマンドレルは、ポップオンタイプでディスク面上に邪魔な突出がありません。また、歯面や修復物を傷付けない様、マンドレルは表面処理されています。  
オートクレーブ可能 134℃ 3分

## オプチディスク ミニキット

2022年11月21日 新発売

オプチディスク4種、専用マンドレル2種とオプチシャインを組み合わせた導入向けのお得なキットです。



### 【セット内容】

オプチディスク12.6mm	研磨粒子	入数
エクストラ コース ※	82μm	30
コース/ミディアム	40μm	30
ファイン	20μm	30
エクストラ ファイン	10μm	30

※エクストラ コースの単品販売はありません。

その他	入数
専用マンドレル 24mm	1
専用マンドレル ショート 16mm	1
オプチシャイン	1















品目コード	商品名	標準価格
4188	オプチディスク ミニキット	10,000円

# CR研磨製品キャンペーン

※掲載価格は全て標準価格です。キャンペーン価格につきましては、お取り引き歯科ディーラー様にお問い合わせ願います。


## Kerr<sup>TM</sup> コンポジットレジン・研磨システム ステップチャート

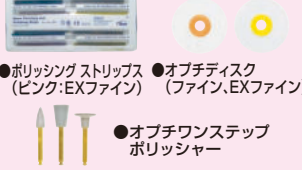カーのコンポジットレジン研磨システムは、カーのフィラー技術を活かして頂く為に開発された研磨システムです。

研磨ステップ	咬合面	平滑面	隣接面
形態修正 1			
	 ●ブルーホワイト カーバイドバー 12枚刃		 ●ポリッシング ストリップス(青:ミディアム)
荒研磨 2	 ●ブルーホワイト カーバイドバー 30枚刃	 ●オブチディスク(コース/ミディアム)	 ●ポリッシング ストリップス(黄:ファイン)
中研磨 3	 ●オブチワンステップ ポリッシャー	 ●オブチワンステップ ポリッシャー (ファイン, エクストラファイン) ●オブチディスク (ファイン, エクストラファイン)	 ●ポリッシング ストリップス (ピンク:EXファイン) ●オブチディスク (ファイン, EXファイン) ●オブチワンステップ ポリッシャー
艶出し 4	 ●オブチワンステップ ポリッシャー ●オブチシャイン、オクルーブラシ	 ●オブチワンステップ ポリッシャー ●オブチシャイン、オクルーブラシ ●ラスターペースト (パフ掛け)	 ●オブチワンステップ ポリッシャー ●オブチシャイン、オクルーブラシ

### オブチワンステップ ポリッシャー / CR用ワンステップ シリコンポイント

- オブチワンステップ ポリッシャーは各社コンポジットレジンに対応するワンステップタイプのシリコンポイントです。
- 様々な粗さのポイントやブラシを使い分ける必要が無く、1本で中研磨から艶出しまで行えます。
- オートクレーブ対応：134℃ 3分
- 力加減で研磨力をコントロールします。始めは強めに研磨し(レジン表面粗さ：0.35μm以下)、軽く当てる事で艶出し(レジン表面粗さ：0.2μm以下)が完了します。
- 注水下 10,000rpm以下

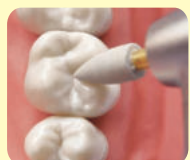

フレイムを用いて咬合面を仕上げます。カップは隅角や咬頭の研磨に適しています。



平滑面の研磨にはフレイムを、切縁の研磨にはディスクを用います。



隣接面は歯間鼓型空隙に合わせ、フレイムやディスクを用いて研磨します。



フレイム カップ ディスク

【アソートミニキット】 フレイム、カップ、ディスク 各2本入  
【単品】 各12本入

作業部：シリコン 研磨材：ダイヤモンド砥粒 10μm  
最大使用回転数：注水下 10,000rpm以下  
オートクレーブ：134℃ 3分

#### ●アソートミニキット

品目コード	商品名	標準価格
8004	オブチワンステップ ポリッシャー アソートミニキット	3,800円

#### ●単品 (12本入)

品目コード	商品名	標準価格
8001	フレイム	7,500円
8002	カップ	
8003	ディスク	

# キャンペーン期間 2022年11月21日～2023年2月20日

## オブチシャイン / CR用研磨ブラシ

研磨粒子がブラシに練り込まれています。  
回転させてソフトタッチで断続的に押しつけて、咬合面などポイントでは研磨しにくい部分を研磨ペースト無しで最終研磨まで行う事ができます。

- 咬合面、裂溝、咬頭頂などの研磨に
- ポリッシングペースト不要
- 従来のポイントよりも素早く光沢が得られます。
- 歯牙の形態、修復物のマージンなどに損傷を与えません。
- オートクレーブ可能134℃ 3分。



ブラシが内側に斜めにカットされ選角や咬頭にフィットし、効率よく研磨できます。



オブチシャインは斜めカット形状で選角にフィットします。

研磨ペースト不要



研磨粒子がブラシに練り込まれています。

品目コード	商品名	標準価格
2513	オブチシャイン	4,200円

一般医療機器 歯科研削用ストリップ 医療機器製造販売届出番号: 27B1X001491021000

## ポリッシング ストリップス / 4ステップ CR研磨ストリップス

- ポリッシング ストリップスは隣接面研磨用のストリップスで、4種類の研磨粒子が色分けされています。
- 1枚のストリップスに2種類の研磨粒子がコーティングされ、1枚のストリップスで2ステップの研磨が行えます。
- コンポジットレジンをはじめ、ガラスイオノマー、プレシャス及びセミプレシャスメタルを含む修復物の調整・研磨に使用します。
- 中央の研磨材ノンコーティング部より歯間に挿入しますので、コンタクトを痛めません。
- 全長: 181mm 幅: 1.9mm、3.9mm  
研磨粒子: 75 $\mu$ m、55 $\mu$ m、22 $\mu$ m、9 $\mu$ m



品目コード	商品名	標準価格
295	ポリッシング ストリップス アソート	10,500円

一般医療機器 歯科研削用ストリップ 医療機器製造販売届出番号: 27B1X001491021000

## ラスターペースト / CR用研磨材

コンポジットレジンの最終研磨用ペーストです。  
少量をバフに塗布し使用します。



品目コード	商品名	標準価格
20195	ラスターペースト 6ml	4,500円

一般医療機器 歯科研削材料 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149107400


# CR研磨製品キャンペーン

※掲載価格は全て標準価格です。キャンペーン価格につきましては、お取り引き歯科ディーラー様にお問い合わせ願います。


キャンペーン期間  
2022年11月21日～  
2023年 2月20日

## ルーシーウェッジ クラシックソフト / マトリックスウェッジ

コストパフォーマンスに優れたウェッジです。隣接部に差し込み歯間分離・マトリックスの固定を行います。また、光照射器の光を拡散し、光が届きにくい部分の重合を施します。

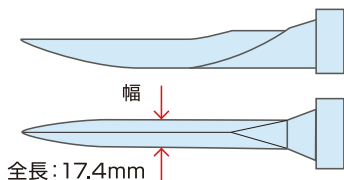

種類	ウルトラスリム	スモール	ミディアム
幅	1.0mm	1.2mm	1.6mm

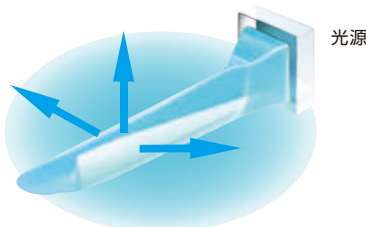

光源から入った光の95%が直角に拡散します。



品目コード	商品名	内容	標準価格
790S	ルーシーウェッジ ソフト アソート	ウルトラスリム 100本、 スモール、ミディアム 各50本	13,800円

一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149100700

## アダプトセクショナル マトリックス / 隣接面用マトリックス

アダプトセクショナル マトリックスを併用した隔壁



写真提供 / 青島 徹児 先生



### キャンペーン対象外※

CHECK!  
アダプトセクショナル  
マトリックスの  
使い方、臨床レポートを  
チェック

### 01 隣接面充填の効率化

予めカントゥアが付与され、自然な隣接面形態を簡単に回復することができます。

### 02 症例に合わせた4形態

緩い豊隆のモデレート、強い豊隆のインクリーズドと2種類の高さ (5mm、6.5mm) により、部位や症例に合わせて選択することができます。

### 03 前歯、臼歯対応

臼歯部はもちろん、前歯部にも応用することができます。

※アダプトセクショナル マトリックスはキャンペーン対象外となります。

一般医療機器 歯科用マトリックスバンド 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149103900

### 社名変更のご案内

弊社は9月1日付でエンビスタジャパン株式会社に社名を変更いたしました。KaVoからDEIXSにブランド変更したイメーシング製品、一般歯科材料のKerr製品、矯正のOrmco製品を通じて、歯科診療の一助となり、患者さまの健康と笑顔に貢献することをその使命としています。今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

旧社名: カボデンタルシステムズ株式会社  
新社名: エンビスタジャパン株式会社

### スペシャルコンテンツのご案内

お申し込みはこちら

こちらのアンケートをご回答頂いた先生方にはKerr130周年を記念したスペシャルコンテンツとして「もう一度見たい」とご要望が多かった人気講師による過去のオンラインセミナーをご視聴頂ける特設チャンネルをご案内致します。



ご注文は、お取り引き歯科ディーラー様までお願いいたします。



Webサイト

Envista エンビスタジャパン株式会社  
〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー  
TEL:0800-111-8600 FAX:03-6866-7273  
[www.envistaco.jp](http://www.envistaco.jp)

KKSAJB2210V1 KR-0260