

症例に合わせたクリニーク チューブと プロカップ、プロフィールカップの応用

Kerr™



ふき歯科クリニック 院長
(愛知県)

河内 洋順 先生

症例に合わせたクリニーク チューブとプロフィールカップの活用方法をご紹介します。

クリニーク チューブは、口腔内の状況や患者さんの希望に合わせて、5つの中から選択することができます。天然ガラスを主成分とした真珠岩粒子は使用と共に形状が変化し、ステイン除去から最終研磨まで行えるオールインワンタイプのため、効率的でチェアタイムの短縮に繋がります。

プロカップは側面にらせん状のリブが付与されたラバーカップで、ペーストが飛散せずにカップ先端に向かって流れる構造となっています。また、プロフィールカップは特長として部位、症例に合わせた12種類の豊富なバリエーションが挙げられます。そのため口腔内の状況に合わせて、様々な形状や硬さから選択できます。これは効率よく治療を行う上で、とても重要となります。

それでは症例に合わせて最適なペーストとカップをご紹介します。

●症例1 ラバーカップ：プロカップ スクリュー ハード / クリニーク チューブ：ペパーミント



喫煙者のため着色が気になります。

カップはハードを選択し、側面のリブを用いて着色を除去しました。

●症例2 ラバーカップ：プロフィールカップ スクリュー ハード ラミネート / クリニーク チューブ：ペパーミント(フッ素なし)



6歳の患者様のシーラント前の歯面清掃に使用。

ダイアグノデントの数値が高いため保護者に説明し、小窩裂溝充填処置を行いました。

歯面清掃を行い、その後、プロフィールカップを用いて、クリニークチューブのペパーミント(フッ素なし)を使用しました。

シーラントは基本的に小児に行いますが、ミントが苦手な子が多いので、できれば無味無香料で刺激の少ないライトフレーバーのフッ素なしが望まれます。

ブラークが厚い症例には、カップはハードを使用しています。

●症例3 ラバーカップ：プロフィーカップ スクリュー ソフト スパイラル / クリニック チューブ：ペパーミント(フッ素なし)



嘔吐反射の強い患者様。開口量が小さく、長時間保持できません。また、舌を器具でおさえることを拒まれました。カップ側面の突起を使用することで、口を大きくあけなくても済みます。また、嘔吐反射のある患者様には、気持ち悪さが軽減されるペパーミントが好評です。患者様は「さわやかな味で、気持ちいい」との感想を言われていました。開口量が小さくても、効率よく処置が行え、結果として時間を短縮して行うことができました。

●症例4 ラバーカップ：プロフィーカップ スクリュー ソフト ラミネート / クリニック チューブ：ライト



妊娠中であつわりがある患者様。匂いに敏感になっているため、クリニック チューブは無味無香料のライトを使用しました。「これはいい!」「他の妊婦さんにも使ってあげてください」と大変好評でした。毎月メンテナンスに来院されており、プラークは少ないので、カップはソフトを使用しています。

●症例5 ラバーカップ：プロフィーカップ スクリュー ソフト ポイント / クリニック チューブ：ペリー



全顎に矯正装置が入っている症例です。矯正治療中は、歯面にプラークが付きやすく、また、患者様ご自身では完全には磨き切れない場所です。そのため、ブラケット周囲の歯面の脱灰や、う蝕のリスクもあります。そこで、歯ブラシでは届かず、う蝕になりやすい場所を処置していきます。このカップは狭い所にも入りやすく、コシもあるため使い心地も良好です。クリニック チューブはむし歯予防のため、フッ素入りを選択しています。

先に挙げた症例は一例ですが、フッ素の有無や無味無香料まで揃うオールインワンタイプのクリニック チューブと、豊富なバリエーションのKerrのラバーカップの組み合わせは、処置が効率よく行えるため、結果的に時間短縮となり、患者様の満足度向上に繋がります。

プロフィーカップ/PMTC用ラバーカップ



製品情報は
[こちら](https://bit.ly/3q970fQ)
<https://bit.ly/3q970fQ>

一般医療機器 歯磨カップ 医療機器製造販売届出番号:27B1X00149112300

プロカップ/PMTC用ラバーカップ



製品情報は
[こちら](https://bit.ly/3gyXhMo)
<https://bit.ly/3gyXhMo>

一般医療機器 歯磨カップ 医療機器製造販売届出番号:27B1X00149102200

クリニック チューブ/PMTC用プロフィーペースト



製品情報は
[こちら](https://bit.ly/3gAJ6Xn)
<https://bit.ly/3gAJ6Xn>

一般医療機器 歯面研磨材 医療機器製造販売届出番号:27B1X00149103600

クリーニングブラシ/PMTC用ナイロンブラシ



製品情報は
[こちら](https://bit.ly/3gyXhMo)
<https://bit.ly/3gyXhMo>

一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 医療機器製造販売届出番号:27B1X00149102800

ご注文は、お取り引き歯科ディーラー様までお願いいたします。



Webサイト



Envista エンビスタジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー

TEL:0800-111-8600 FAX:03-6866-7273

www.envistaco.jp

KKSAJB2301V1 KR-0266